

Топическое применение активных препаратов до и после RF

Сочетанная методика для лифтинга и уплотнения кожи, устранения купероза и обезвоженности.



Виктория Стахурлова

врач дерматолог-онколог,
косметолог, Москва

g-doc.ru

Клинический случай

Пациент — женщина, 52 года.
Жалобы: неравномерный цвет лица, покраснение и чувствительность кожи, активное формирование морщин, сухость и дряблость.

Объективно: явления купероза, обезвоженность кожи, наличие морщин, недостаточный лифтинг кожи, «серый» цвет лица.

Запрос на нивелирование всех данных явлений, общее омоложение.

Материалы и методы

1. Большинство озвученных пациентом проблем способна решить курсовая методика RF-лифтинга на аппарате Ellisys plus S с вакуумным захватом для прочной фиксации мягких тканей и равномерного погружения игл.

2. Для дополнительной гидратации и повышения адаптационных возможностей кожи, а также для подготовки к проведению RF и сокращению реабилитационного периода за счёт восполнения клеточного энергодифицита топически применялся препарат Jufoga (сукцинат натрия 1,6%, полинуклеотиды 4%, гиалуроновая кислота 1% 1850 кДа) — 6,5 мл.






Протокол процедуры

1. Анестезия — крем «Эмла», экспозиция 20 мин.
2. Нанесение препарата Jufoga на всю область лица, 3 мл. Препарат забирался из стерильного флакона иглой 18G и равномерно капельно распределялся по всей поверхности кожи в локализации планируемой коррекции.
3. Проведение процедуры RF-лифтинга: насадка 25 игл, параметры: 5 Вт (RF fluence), длительность импульса (Emission) — 300 мс с глубиной 1,6 мм на область лица, на область орбиты — 5 Вт/100 мс/1,3 мм, на околоушные складки — 4 Вт/400 мс/1,6 мм.
4. Нанесены оставшиеся 3,5 мл препарата Jufoga на всю область лица. Препарат забирался из стерильного флакона иглой 18G и равномерно капельно распределялся по всей поверхности повреждённой кожи.

Во время проведения процедуры RF-лифтинга с вакуумом на аппарате Ellisys Plus S в большом количестве формируются микроканалы, достаточные для полноценной доставки активных компонентов в кожу на заданную глубину.

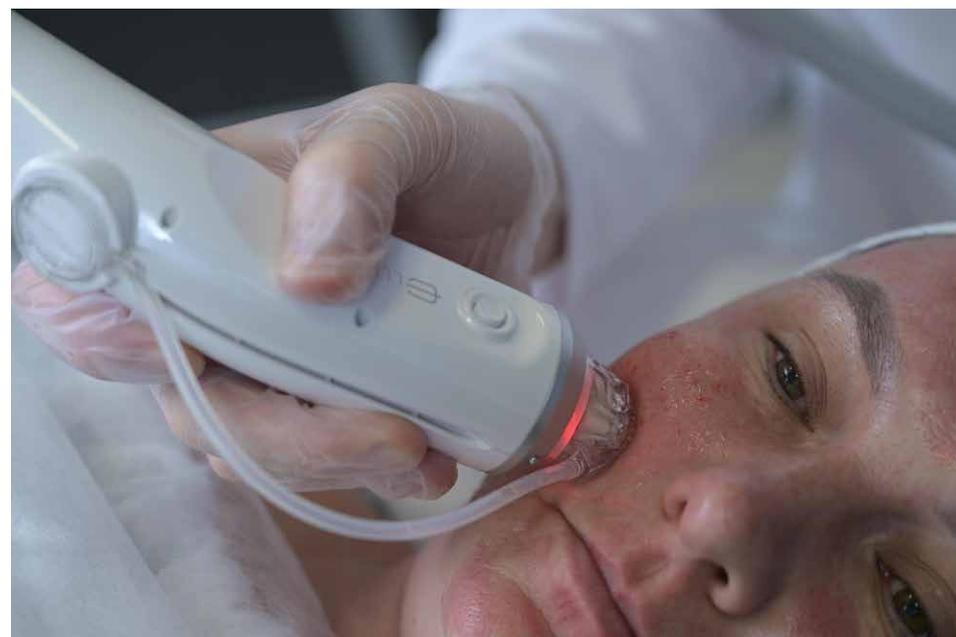

Результат коррекции

Ожидаемый результат от курса из четырёх процедур с интервалом в 3–4 недели — лифтинг-эффект, здоровый цвет лица, разглаживание мелких морщин и профилактика появления новых. ●

