



INNATA[®] 1.5%

JUFORA[®] INNATA[®] 1.5%

протокол применения 


материал-гель для внутрикожной имплантации JUFORA[®],
по ТУ 32.50.22-008-34099688-2023
ПУ № РЗН 2025/25411 от 20.05.2025 г.



INNATA® 1.5%

high molecular [1.4—2.1 mda]

Концентрация
гиалуроната натрия _____ **1.5%**

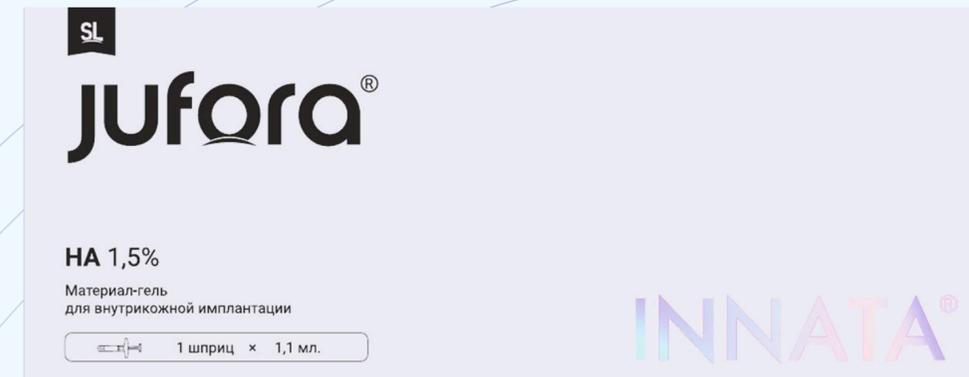

INNATA

INNATA® 1.5%

монопротокол

ПОКАЗАНИЯ

Подходит для зрелой кожи;
Устраняет сухость;
Разглаживает рельеф;
Улучшает цвет лица;
Подготовка и реабилитация к аппаратным процедурам, пластическим операциям.

ТЕХНИКИ

интрадермально папульно,
интрадермально микропапульно;
болеутоляюще.

Расход препарата в мл.	1-2 мл.
Расход препарата в шприцах (лицо)	1-2 шприца
Рекомендованные иглы	30G*12, 32G*4
Курс процедур	3-4 процедуры

1 процедура




2 процедура

3 процедура

4 процедура

интервал между процедурами 14 дней

расстояние между папул
0,5-1 см.

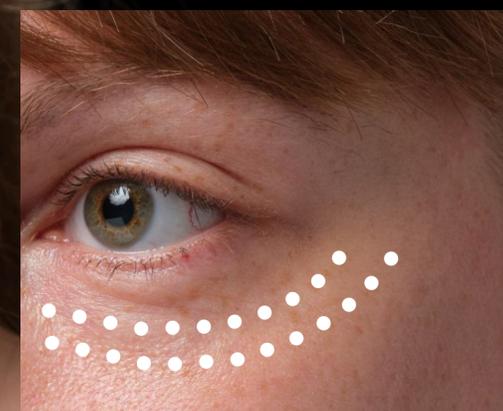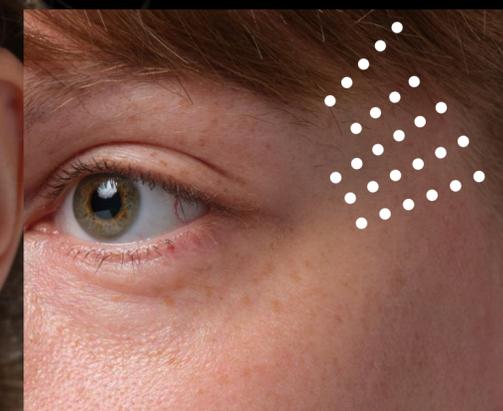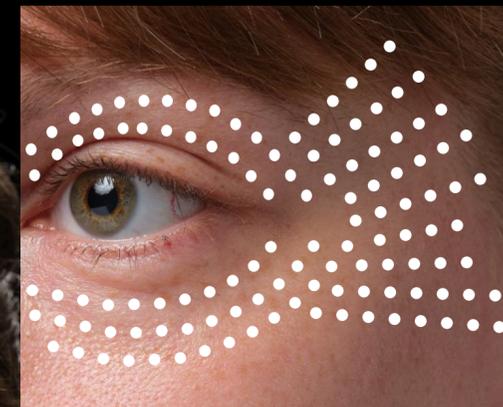

Jufora[®] INNATA[®]



jufora.com




[jufora_ru](https://t.me/jufora_ru)



[jufora.ru](https://www.instagram.com/jufora.ru)

8 (800) 201-99-88

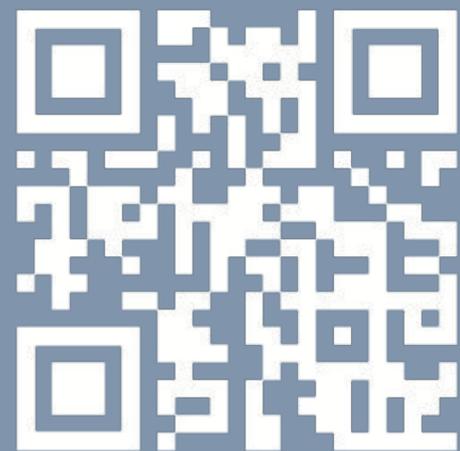

г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар 42, с1

N A
N

I

