

Jufo[®] ULTRALINK[®]

протокол
применения
имплантата

S

M

S

L




ULTRALINK[®]
TECHNOLOGY

Система ULTRALINK[®]: основа, контур и оптимизация результата

Ultralink[®]L | Ultalink[®]M

Моделирование и восстановление утраченных объемов

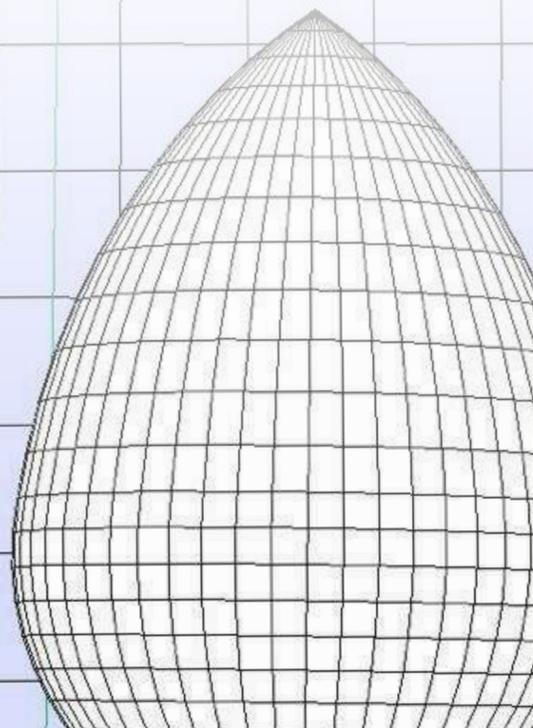

Ultalink[®]M

Эстетическая гармонизация,
восстановление зон
кожной депрессии



Ultalink[®]S

Структурная поддержка
матрикса дермы



ПРОТОКОЛ JUFORA® ULTRALINK®

S



23 мг/мл

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

1. Легкой и средней выраженности заломы кожи;
2. Легкая и умеренная депрессия тканей в зонах формирования меломентальных складок (морщины марионетки);
3. Коррекция периоральной области;
4. Аугментация губ;
5. Коррекция буккальных морщин в т.ч. заломов сна;
6. Лечение сетчатых морщин (мелкая сетка морщин по всей поверхности щек);
7. Коррекция морщин лба и межбровья.



ВЫБОР ПАЦИЕНТА

1. Мужчина или женщина
2. Возраст 25+
3. **Запрос на естественную коррекцию, без выраженного изменения контуров**

УРОВЕНЬ

- интрадермально
- ПЖК

ИНСТРУМЕНТ



Канюля 22G – 50мм, 70мм
Игла 27G, 30G



ТЕХНИКА



- линейно-ретроградная
- веерная

БУККАЛЬНЫЕ МОРЩИНЫ
И МОРЩИНЫ СНА

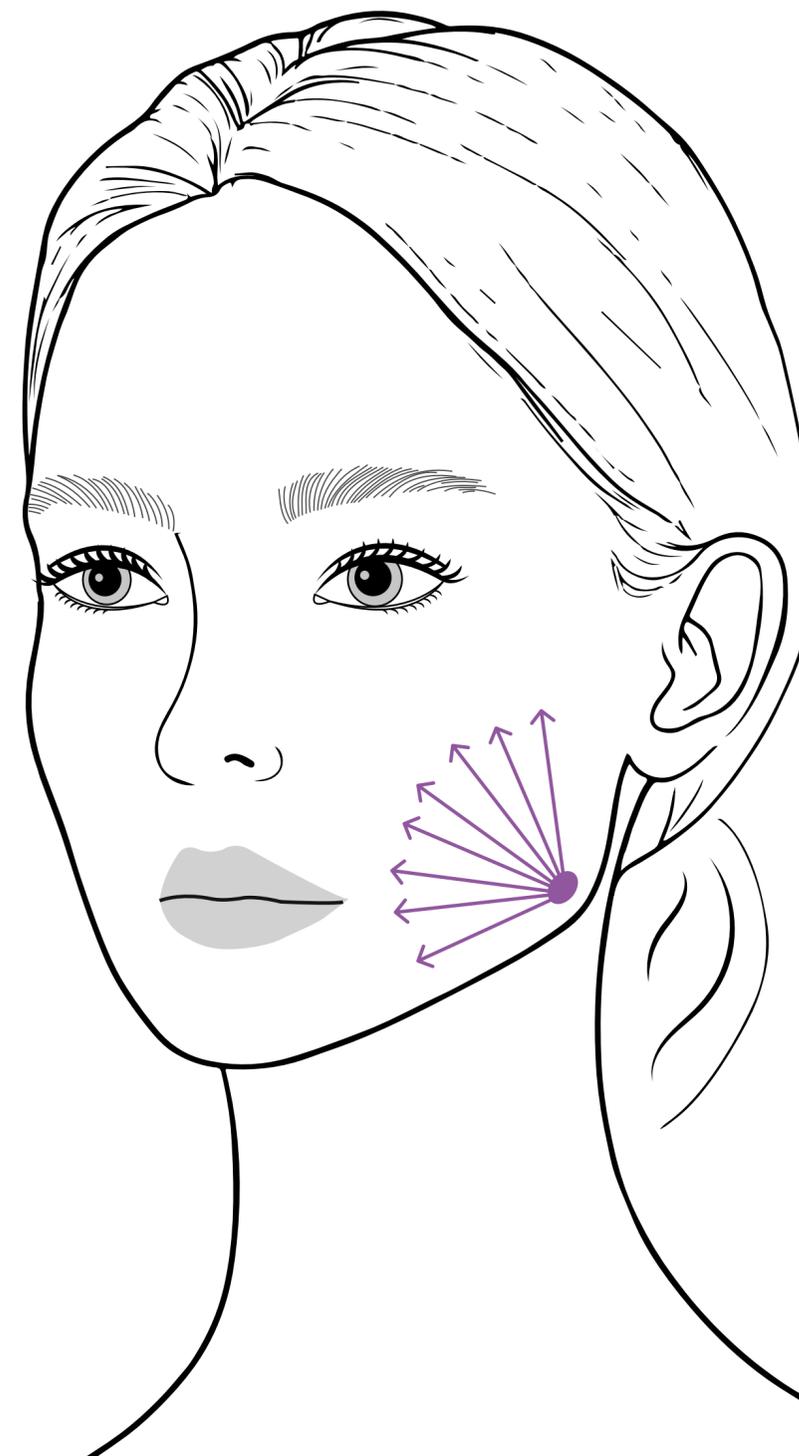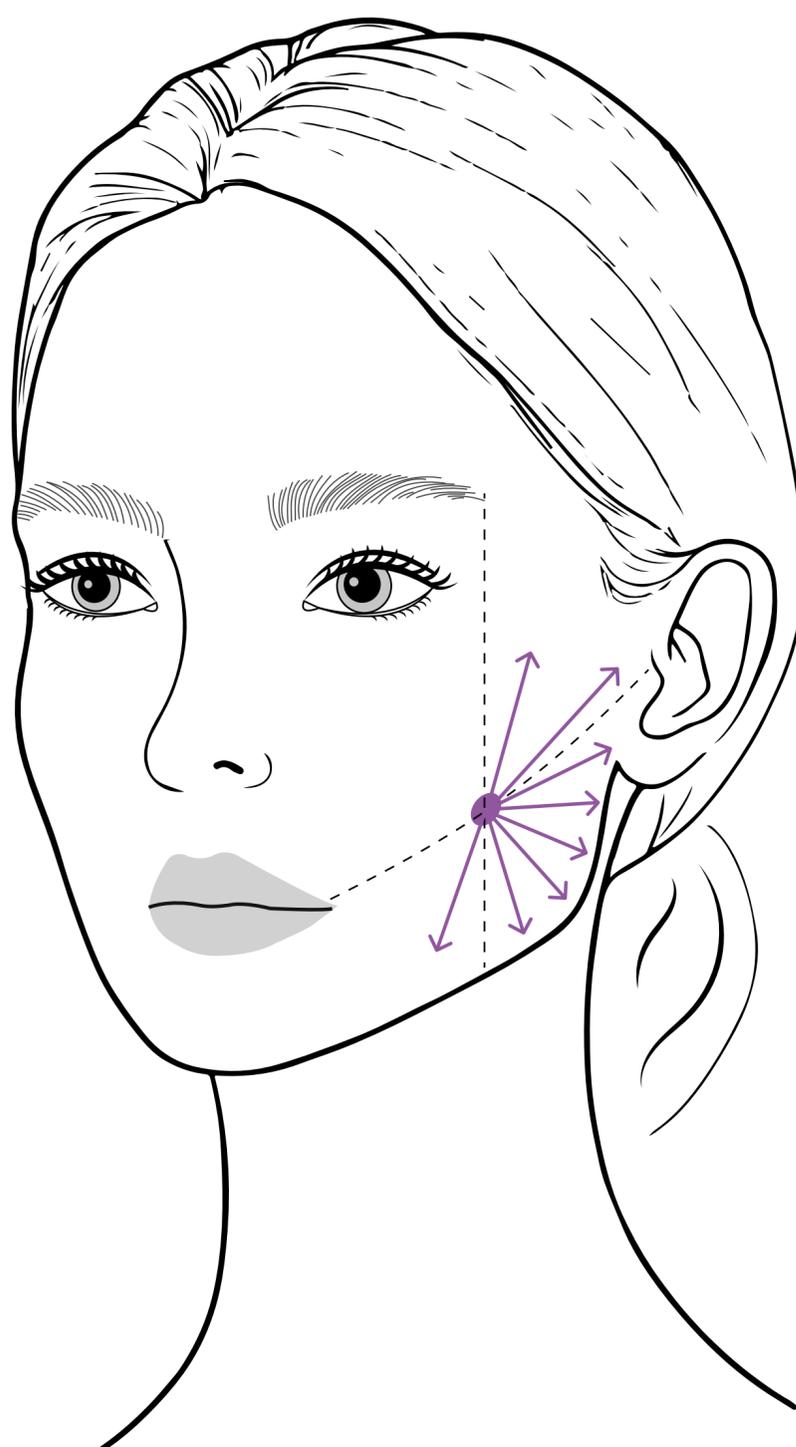

ПРОТОКОЛ JUFORA® ULTRALINK®

S

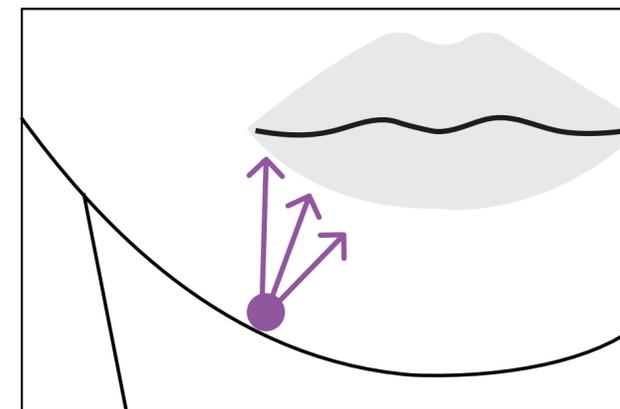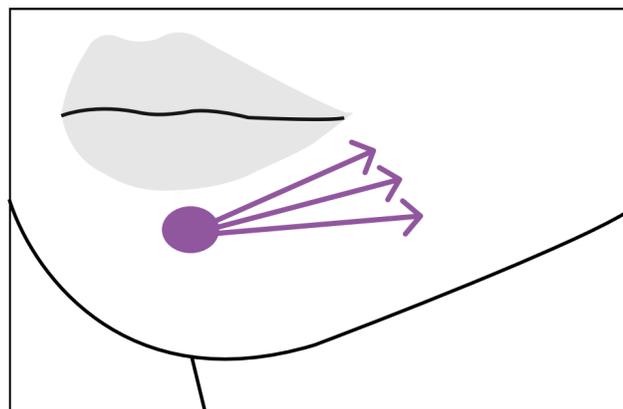

МЕЛОМЕНТАЛЬНЫЕ СКЛАДКИ (МОРЩИНЫ МАРИОНЕТКИ)

ТЕХНИКА

Линейно ретроградная, веерная



ИНСТРУМЕНТ

Канюля 22G – 50мм, 70мм

Игла 27G, 30G

УРОВЕНЬ

Интрадермально, ПЖК

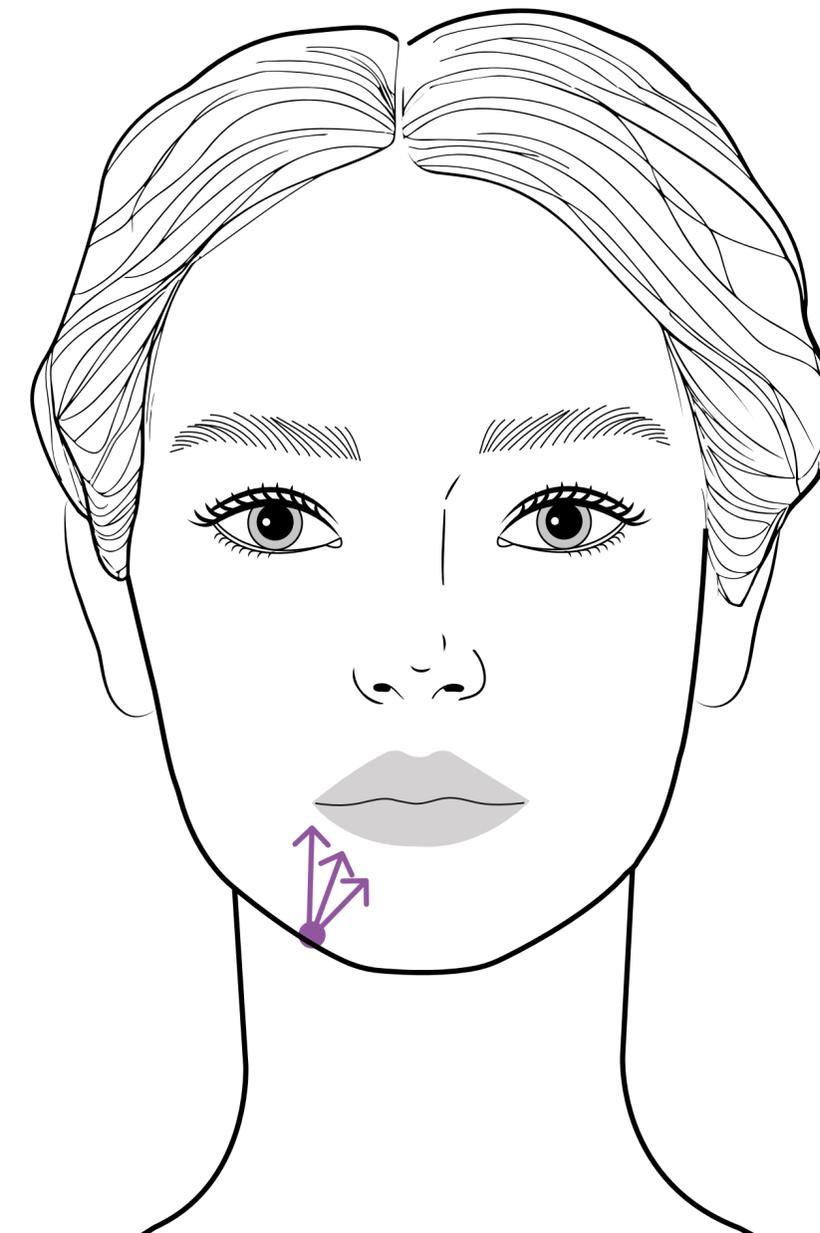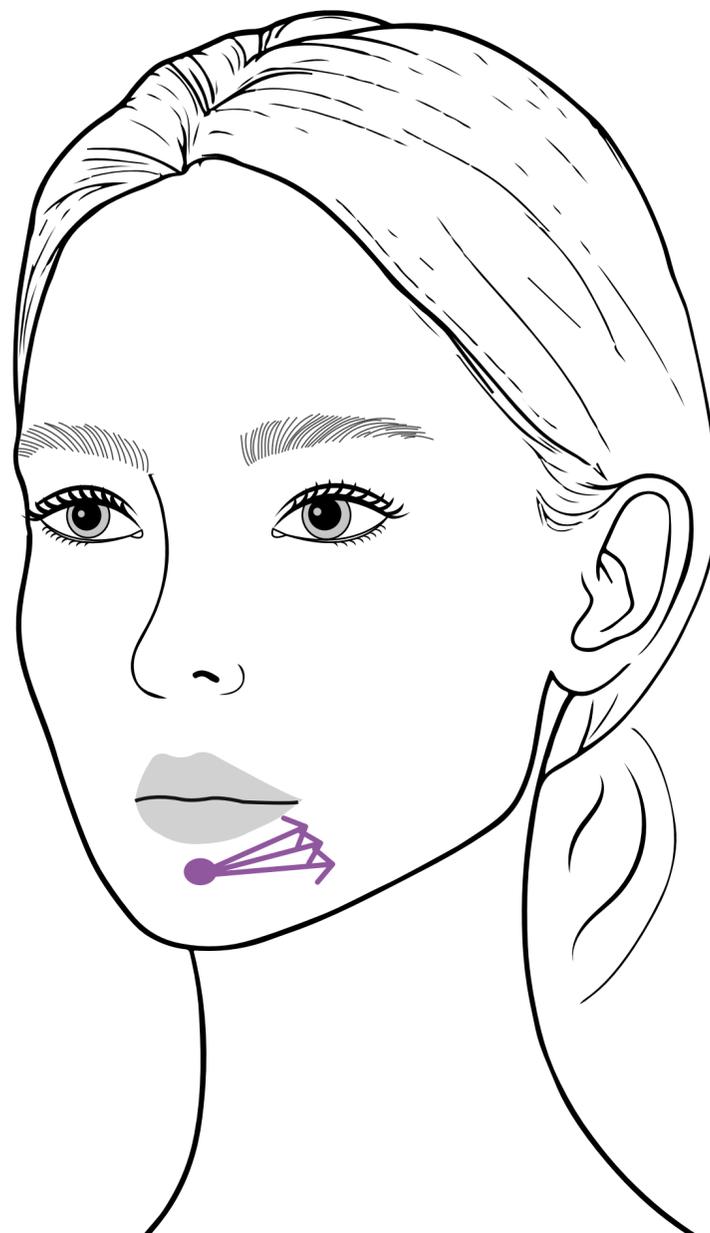

ПРОТОКОЛ
JUFORA® ULTRALINK®

S

АУГМЕНТАЦИЯ ГУБ

ТЕХНИКА



Линейно ретроградная, веерная

ИНСТРУМЕНТ

Игла 27G, 30G

УРОВЕНЬ

Подслизистый слой

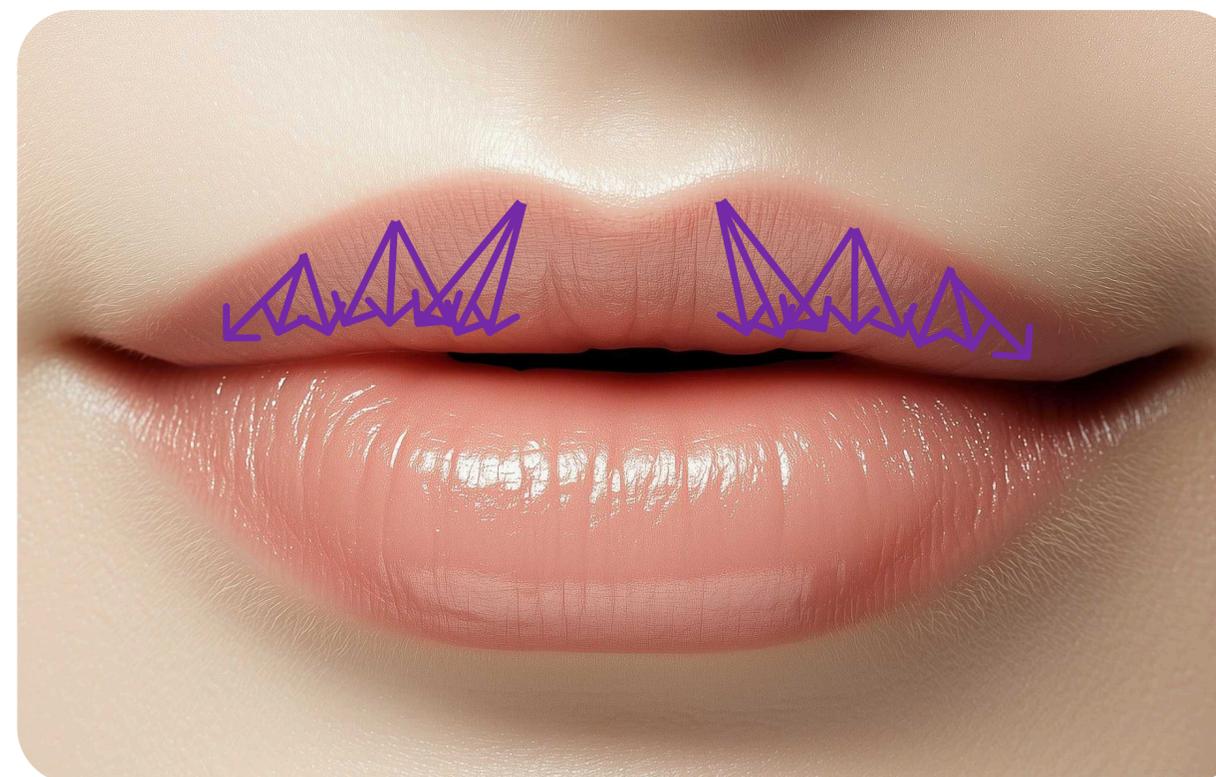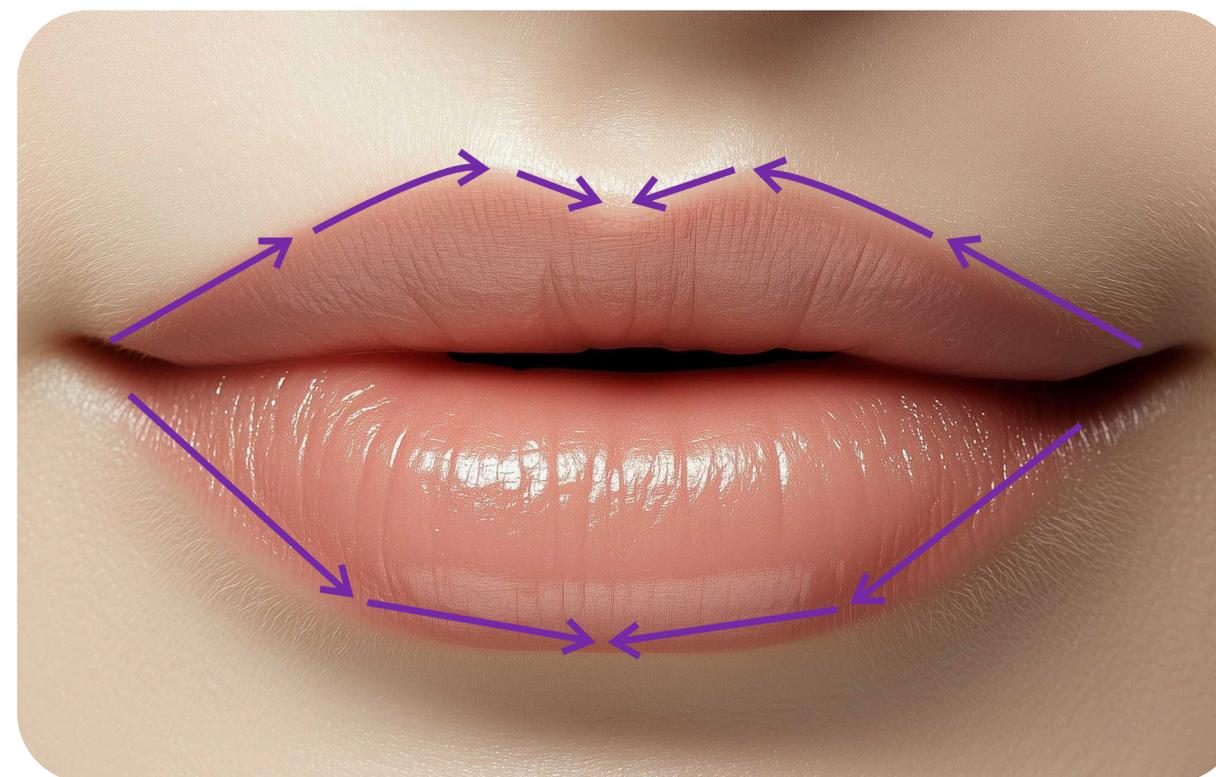

ПРОТОКОЛ
JUFORA® ULTRALINK®

S

АУГМЕНТАЦИЯ ГУБ

ТЕХНИКА



Линейно ретроградная, веерная

ИНСТРУМЕНТ

Игла 27G, 30G

УРОВЕНЬ

Подслизистый слой

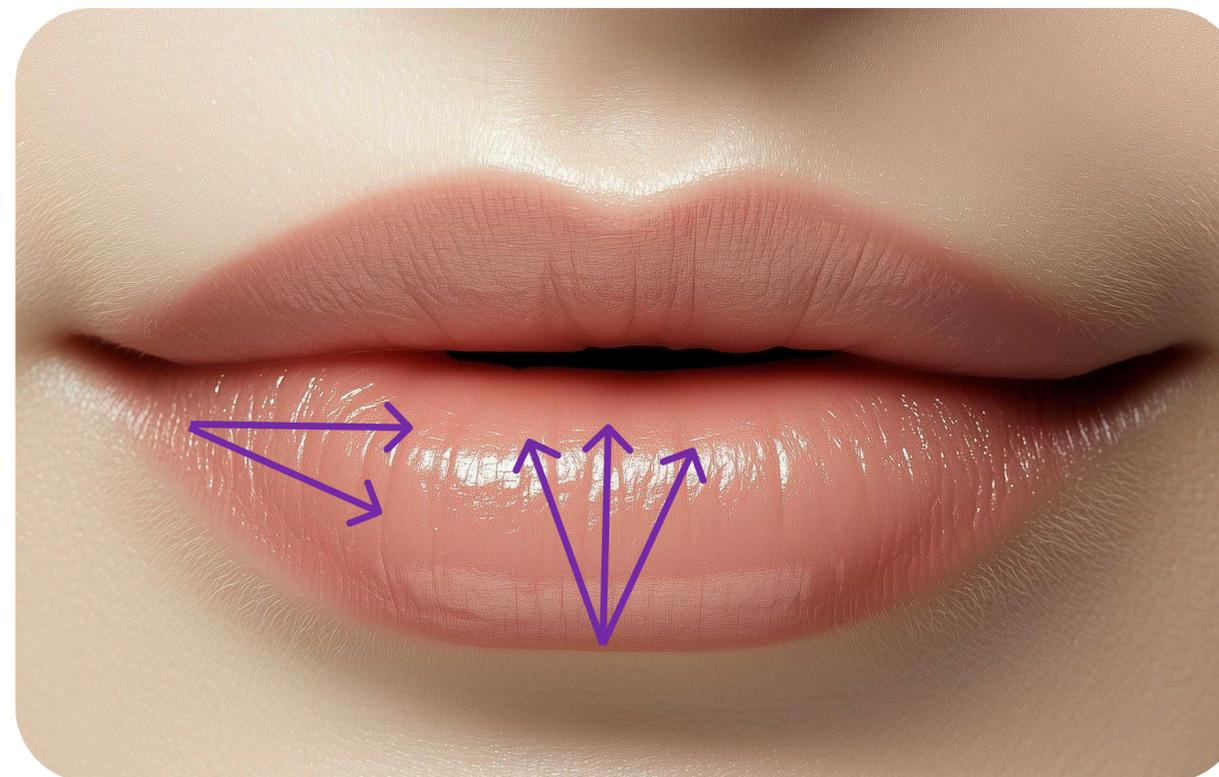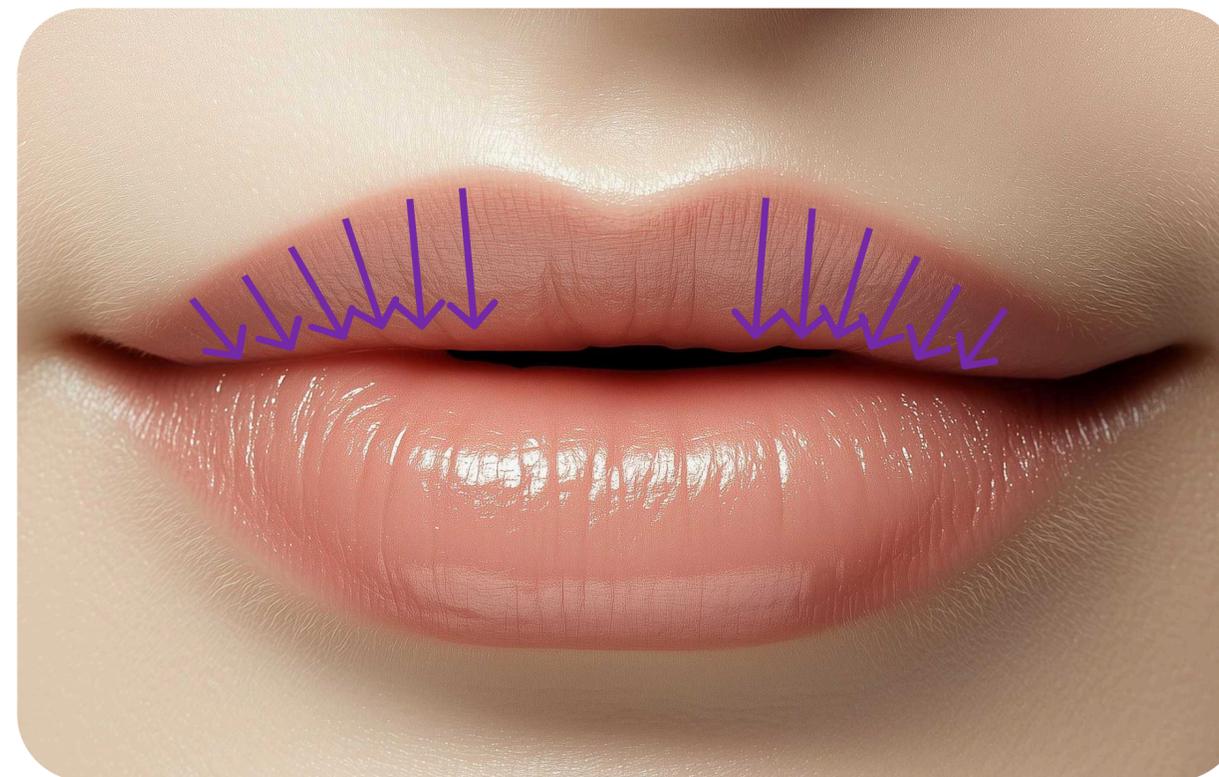

ПРОТОКОЛ JUFORA® ULTRALINK®

S

АУГМЕНТАЦИЯ ГУБ

ТЕХНИКА


Линейно ретроградная, веерная

ИНСТРУМЕНТ

Канюля 25G – 50мм

УРОВЕНЬ

Подслизистый слой

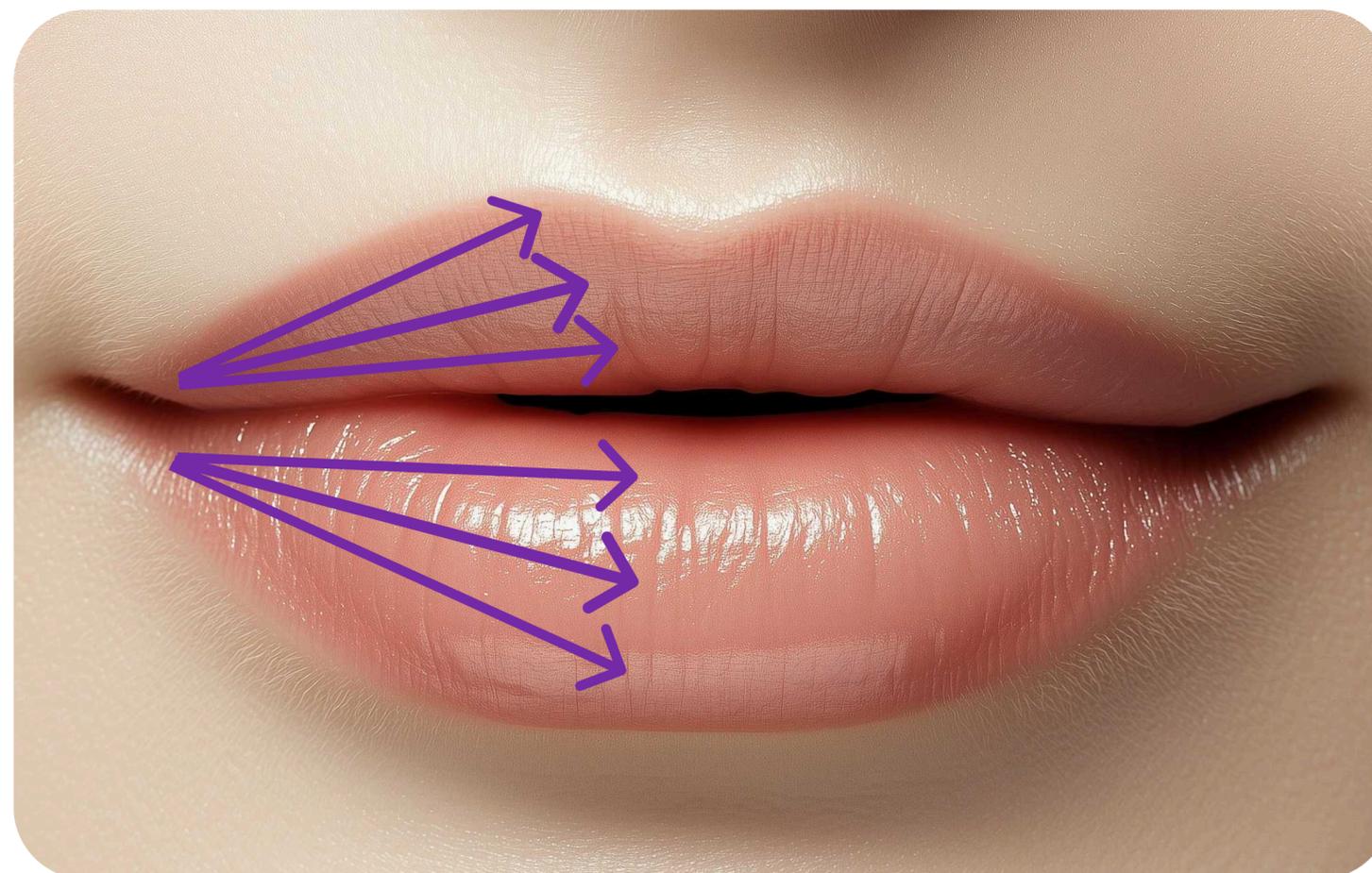

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЪЕКЦИЙ JUFORA® ULTRALINK® S

Фото из личного архива
врача Стахурловой В.В.



КОРРЕКЦИЯ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК

Женщина, 50 лет

ОБЪЕМ ПРЕПАРАТА


1,0 мл



ДО/ПОСЛЕ ULTRALINK® S

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЪЕКЦИЙ JUFORA® ULTRALINK® S

Фото из личного архива
врача Карпенко К.А.

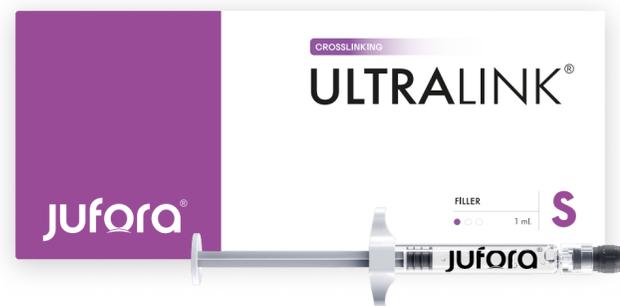

ГУБЫ


ОБЪЕМ ПРЕПАРАТА
1,0 мл



ДО/ПОСЛЕ ULTRALINK® S

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЪЕКЦИЙ JUFORA® ULTRALINK® S

Фото из личного архива
врача Карпенко К.А.

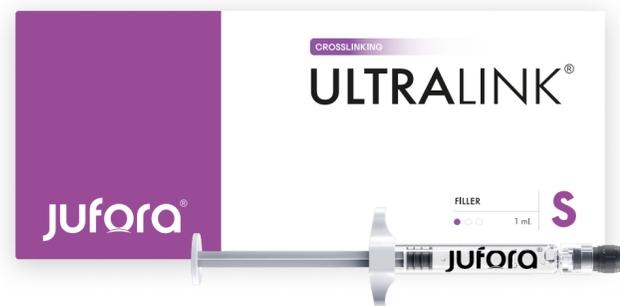

ГУБЫ


ОБЪЕМ ПРЕПАРАТА
1,0 мл



ДО/ПОСЛЕ ULTRALINK® S


РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЪЕКЦИЙ JUFORA® ULTRALINK® S

Фото из личного архива
врача Новиковой Н.В.

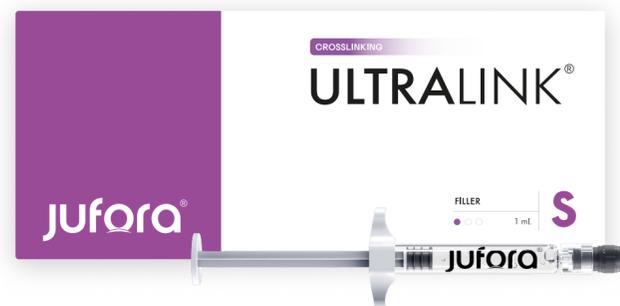

ГУБЫ

ОБЪЕМ ПРЕПАРАТА
1,0 мл

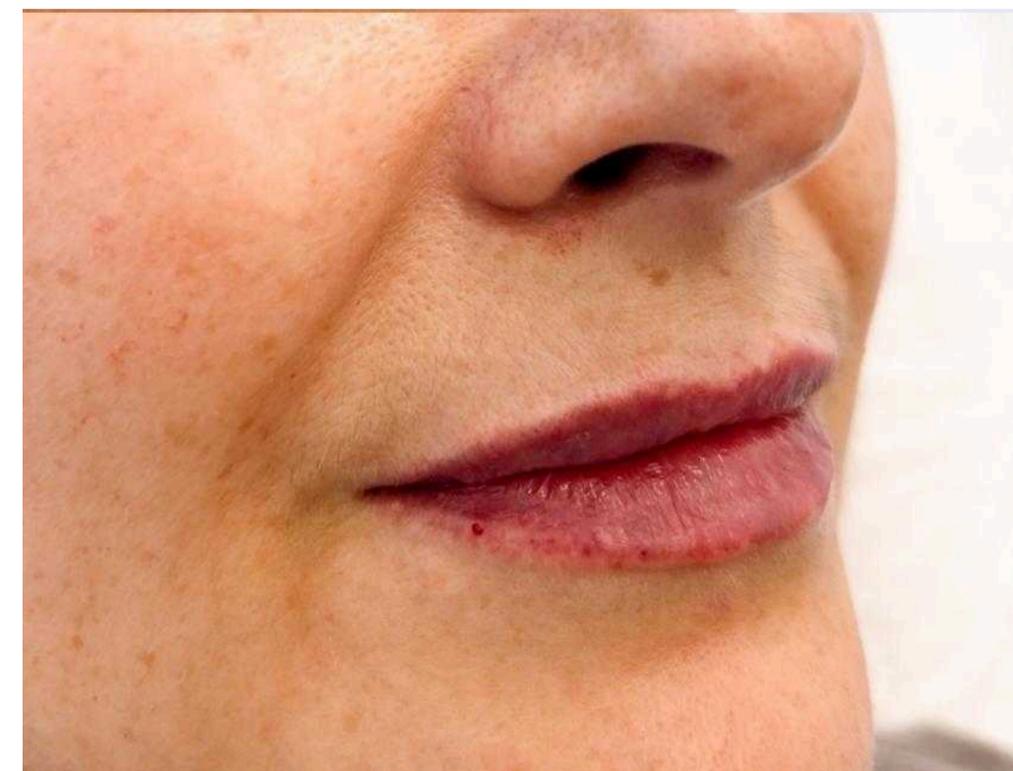

ДО/ПОСЛЕ ULTRALINK® S

S

M

L



г. Москва, тер. Инновационного центра
«Сколково», Большой Бульвар 42/1



[jufora.ru](https://www.instagram.com/jufora.ru)



[jufora.com](https://www.jufora.com)



[jufora_ru](https://www.telegram.com/jufora_ru)

8 (800) 201-99-88